

ลักษณะตัวเครื่อง



การใช้งาน

1. เลือกฟังก์ชันการวัด Body (อุณหภูมิร่างกาย) หรือ Surface (อุณหภูมิพื้นผิว)
2. ยื่นเซ็นเซอร์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการวัด ในระยะห่าง 5 - 12 เซ็นติเมตร
3. กดปุ่มการวัด และอ่านค่าตามหน้าจอแสดงผล

การกดปุ่มการวัด 1 ครั้ง เครื่องจะทำการบันทึกค่าไว้ในหน่วยความจำเครื่อง (สูงสุด 32 ค่า)

การดูค่าจากหน่วยความจำเครื่อง

1. กดปุ่มเปิดเครื่อง
2. กดปุ่ม Up หรือ Down เพื่อเลือกดูค่าที่บันทึกไว้

การลบค่าจากหน่วยความจำเครื่อง

1. กดปุ่ม Up และ Down พร้อมกัน ค้างไว้ 2 - 3 วินาที โดยไม่ต้องเปิดเครื่อง กด Up หรือ Down อีกครั้ง เพื่อเลือก " 0----- "
2. กดปุ่ม MODE เพื่อยืนยันการลบค่าทั้งหมด

การตั้งค่าใช้งาน

- กดปุ่ม MODE ค้างไว้ 2 – 3 วินาที หน้าจอจะแสดง F1 (F1 คือการเปลี่ยนหน่วย °C ↔ °F)
กดปุ่ม Up หรือ Down เพื่อเปลี่ยน หน่วย °C ↔ °F
กดปุ่ม MODE อีกครั้งเพื่อยืนยันและเข้าสู่การตั้งค่าถัดไป
- หน้าจอจะแสดง F2 (F2 คือ การตั้งค่า ALARM)
กดปุ่ม Up หรือ Down เพื่อเลือกค่าอุณหภูมิที่ต้องการ (เริ่มต้นที่ 38 °C , 100.4°F)
กดปุ่ม MODE อีกครั้งเพื่อยืนยันและเข้าสู่การตั้งค่าถัดไป
- หน้าจอจะแสดง F3 (F3 คือ การตั้งค่า Total Difference ซึ่งใช้เฉพาะฟังก์ชัน Body)
กดปุ่ม Up หรือ Down เพื่อเลือกค่าอุณหภูมิที่ต้องการ กดปุ่ม MODE อีกครั้งเพื่อยืนยันและเข้าสู่การตั้งค่าถัดไป
- หน้าจอจะแสดง ON/OFF (ON/OFF คือการตั้งค่าเสียง Buzzer)
กดปุ่ม Up หรือ Down เพื่อเลือก ON = เปิดเสียง และ OFF = ปิดเสียง
กดปุ่ม MODE อีกครั้งเพื่อยืนยันและออกจากการตั้งค่า



LEGA
technologies for next

บริษัท เลก คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1/28 อาคารบางนาธานี ชั้น 14A ซ.บางนา-ตราด 34
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
Tel: 0-2 746 9933 (Auto) Fax: 0-2 746 9940